

## 快適で優しい着け心地。 「新しい生活様式」のフェイスシールド



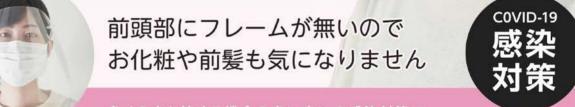

多くの方と接する機会の多い方への感染対策に 受付・レジ・飲食・販売・保育士・医師・看護師・美容師・理容師

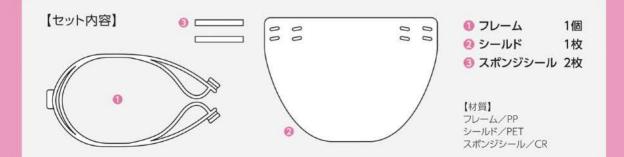



## 使用上の注意事項

- 1. 本製品は、微小な粉塵や水滴等の飛沫が顔にかかることを極力防ぐことを目的としています。 使用者の眼や身体の損傷を防ぐものではありませんので注意してご使用ください。
- シールドの緑(外周の切断面)は厚さが薄いため、皮膚や指を傷つける等ケガをすることが ありますので注意してご使用ください。
- 汚れた場合は、食器用洗剤で洗ってください。※シールド部分のアルコール消毒液の使用 は白濁の原因になりますのでお避けください。
- 4. 本製品に過度な圧力をかけると変形・破損の原因になります。
- 火気を扱う場所でのご使用、高温になる場所での保存はお避けください。
  変形・破損の原因になります。

【使用例】



**安客業** 



容室



歯科クリニック

【シールドの取り付け方法】





シールド部の取付ホールは、頭の大きさ や使用状況に合わせてお選びください。

【販売】 株式会社みつわ 千葉県千葉市美浜区新港 213-5 TEL:043-243-1511 https://mitsuwa-printing.jp/